

## 奎斯邁 卡式三合一手術刀片安全移除器

### 【產品使用說明】

- 用於滅菌環境下之手術刀片移除與收集。
- 有效防止手術過程中需卸除更換刀片時可能造成之手部割傷。
- 透明的外鞘可準確無誤地記錄手術室刀片之使用數量。
- 每組卡式刀片移除器可收納三片手術刀片。

(註冊專利:Taiwan Patent I316400)




### BladeCASSETTE

3in1 | Blade Remover

### 使用中

#### 準備使用:


- 按壓移除器的兩側以鬆開卡榫
- 把外蓋後翻制定位成為移除器基座。

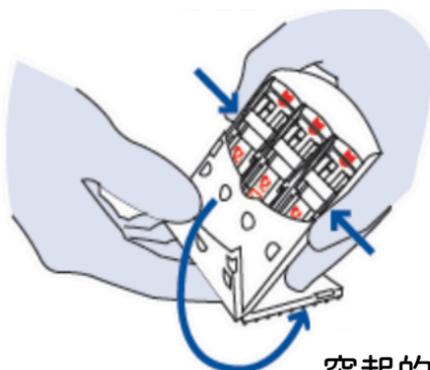

READY FOR USE

突起的小節點  
置於布巾可增加  
固定效果。

① 手術刀銳面朝右順著外殼上的

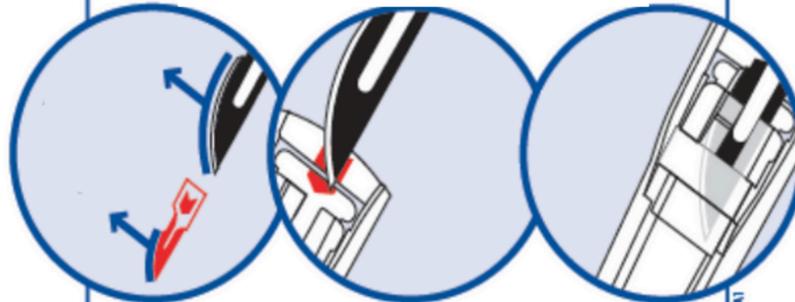


符號所指示的方向  
插入手術刀片

② 以單手方式推  
送刀片直至出  
現卡嗒聲



WHEN SAFE

③ 以單手方式推  
送刀片直至出  
現卡嗒聲

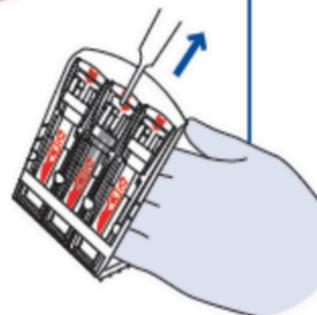

REPEAT TO REMOVE  
UP TO 3 BLADES

#### 準備丟棄:

- 計算已移除之手術刀片
- 闔上外蓋後即可棄置於銳器收集器內。

